

**Gebrauchsanweisung  
für Ärzte  
zur Behandlungseinheit  
Aderlass- Laminar-Nadel/Schlauchsystem Dr. Ewald Töth**

- Entnehmen Sie den Laminarschlauch aus der Verpackung.
- Entnehmen Sie die Nadel aus der Sterilverpackung.
- Achten Sie darauf, dass die Adapter von Schlauch und Nadel beim Öffnen unberührt bleiben.
- Entfernen Sie die Verschlusskappe des Luer-Lock-Ansatzes am Laminarschlauch.
- Schließen Sie nun durch Arretierung des Luer-Lock-Ansatzes Nadel und Laminarschlauch zusammen.
- Die Schutzkappe der Nadel bleibt bis zum Zeitpunkt der Venenpunktion auf der Nadel.
- Der Laminarschlauch wird mit dem speziellen Spitzwinkel-Schlauchende so in das Aderlass-Auffanggefäß gelegt, dass das Blut an der Innenwand des Gefäßes abfließen kann.

Gutes Gelingen beim Aderlass!

Dr. Ewald Töth

Baden, im April 2012